



Κωδικός: 062147

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ “ACTIVE CSA”

Κατασκευή από ελαφρύ αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης Distance III τριών στρωμάτων. Εξωτερική επένδυση polyamide και εσωτερική από foam και 3D polyamide. Όλα τα υλικά είναι αντιεφιδρωτικά, αεριζόμενα και αδιάβροχα. Οι δύο αμφίπλευρες μεταλλικές μπανέλες, ανατομικά διαμορφωμένες, σταθεροποιούν αποτελεσματικά τους ιστούς της ποδοκνημικής. Ο νάρθηκας φέρει ειδικό ρυθμιζόμενο σύστημα “CCA BOA System” συμπίεσης σε πολλαπλά επίπεδα. Η ρύθμιση των επενδεδυμένων μεταλλικών κορδονιών επιτρέπει την σωστή εφαρμογή του νάρθηκα στην ποδοκνημική. Αμφιδέξιος. Χρώμα: Μαύρο/κόκκινο

Τρόπος εφαρμογής “CCA BOA System”

- Στρίβεται το μπουτόν δεξιόστροφα μέχρι να επιτευχθεί το σωστό επίπεδο συμπίεσης.
 - Για χαλάρωση του συστήματος “BOA”, τραβήξτε το μπουτόν προς τα έξω και γυρίστε το αριστερόστροφα μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.
- Η απόλυτη σταθεροποίηση επιτυγχάνεται και με την αυτοκόλλητη οκτωειδή επίδεση.

Ενδείξεις

- Χρόνια αστάθεια ποδοκνημικής
- Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος
- Αποκατάσταση σε διάστρεμμα - κακώσεις ποδοκνημικής
- Εξάρθρωση αστραγάλου
- Προστασία μετά από νάρθηκοποίηση με πρόπλασμα γύψου
- Κακώσεις αχιλλείου τένοντα

Μεγέθν	small	medium	large	x-large
Περίμετρος πτέρνας	27-30 cm	30-33 cm	33-36 cm	36-39 cm